

“阿爾傑”胃管(滅菌)
“ALGER” STOMACH (GASTRIC) TUBE (Sterile)

衛部醫器製字第007744號

使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用！

一、產品敘述：

本產品適合吞嚥困難之患者使用，以提供患者所需的營養以及藥品。

二、產品用途：

適用於胃部減壓、灌洗及（或）營養、藥品的供給。

三、適應症：

因各種原因造成的無法進食、吞嚥困難之症狀。

四、禁忌症：

- * 食道狹窄
- * 食道穿孔（瘻管）
- * 精神疾病
- * 嚴重鼻中膈彎曲
- * 誤食腐蝕性食物
- * 顱底、鼻骨或是臉部骨折
- * 腸阻塞
- * 剛完成食道、氣管手術
- * 腸道活動障礙
- * 鼻道發育不完整
- * 正在流鼻血
- * 其他經醫師評估後不適用之症狀

五、使用方法：

* 操作前先以肥皂徹底洗淨雙手。

* 採半坐臥或抬高床頭30-60度，防止食物倒流，若有需要抽痰，則應先抽痰後再灌食，以免嘔吐。

* 檢查鼻胃管的位置是否有以下的不正常情形：

(1) 膠布標記移位滑脫。

(2) 鼻胃管滑脫或纏繞在嘴巴裡面。

* 灌食前評估病人是否有腹脹、噁心…等不適情形。

* 灌食前先反折鼻胃管、接上空針反抽胃部食物狀況，若反抽食物量大於100cc，先將反抽液緩緩灌回，然後等一小時之後再次評估；若少於100cc，且病人沒有腹脹不適，即可灌食。若是反抽食物呈現鮮紅色、咖啡色或是暗綠色時，不可將之灌回，應停止灌食並通知醫護人員處理。

“阿爾傑”胃管(滅菌)
“ALGER” STOMACH (GASTRIC) TUBE (Sterile)

* 「一截式」鼻胃管灌食步驟：

- (1) 反摺鼻胃管。
- (2) 將鼻胃管灌食端的開口打開。
- (3) 取出灌食空針的內管。
- (4) 接上灌食空針。
- (5) 將灌食的食物倒入灌食空針中，鬆開反摺的鼻胃管，讓食物自動流入鼻胃管中。每餐灌食時間為20-30分鐘，每次250到350cc。
★可以用手指捏住鼻胃管以控制灌食流速。
- (6) 當灌食之食物快流完時，倒入20~30cc的開水到灌食空針中，以沖洗鼻胃管，防止食物阻塞鼻胃管。
- (7) 灌食結束後，先將鼻胃管的開口端反折，然後取下灌食空針，並將鼻胃管開口用塞子塞緊，以防止空氣灌入鼻胃管，造成患者腹脹不適。

* 「兩截式」鼻胃管灌食步驟：

- (1) 拔下鼻胃管「內管」接頭的塞子，再將鼻胃管「外管」接上「內管」的接頭。
 - (2) 反摺鼻胃管「外管」。
 - (3) 將鼻胃管「外管」灌食端的開口打開。
 - (4) 取出灌食空針的內管。
 - (5) 接上灌食空針。
 - (6) 將灌食的食物倒入灌食空針中，鬆開反摺的鼻胃管「外管」，讓食物自動流入鼻胃管中。每餐灌食時間為20-30分鐘，每次250到350cc。
★可以用手指捏住鼻胃管「外管」以控制灌食流速。
 - (7) 當灌食之食物快流完時，倒入20~30cc的開水到灌食空針中，以沖洗鼻胃管，防止食物阻塞鼻胃管。
 - (8) 清洗完畢後，先將鼻胃管「外管」的開口端反折，然後取下灌食空針，並將鼻胃管「外管」的開口用塞子塞緊，以防止空氣灌入鼻胃管，造成患者腹脹不適。
 - (9) 拆下鼻胃管「外管」，再用塞子將鼻胃管「內管」的接頭塞緊，以防止空氣灌入鼻胃。
- ★灌食完畢後拆下的鼻胃管「外管」必須使用清水清洗，然後瀝乾。清洗時不要使用尖銳物，以免刺破鼻胃管。

六、注意事項：

- * 本產品須經醫師評估使用。
- * 本產品須由護理人員或是受過專業訓練的人員操作使用。
- * 如有疑慮插入氣管，須立即拔出重新插入。

“阿爾傑”胃管(滅菌)
“ALGER” STOMACH (GASTRIC) TUBE (Sterile)

- *插管過程如有嘔吐，須將患者的頭部傾向一側，以防吸入性肺炎。
- *插管過程如有鼻出血，須先止血，必要時請通知護理人員處理。
- *不可灌食過快，以免患者噁心、嘔吐、腹脹或腹瀉。
- *灌食過程不要擠壓、拉扯或扭曲鼻胃管。
- *使用兩截式鼻胃管灌食時，要確定連接處是否緊密接合。
- *灌食或是給藥時，要先將食物或藥品研磨細碎，以防止堵塞鼻胃管。
- *請輪流使用兩個鼻孔插管，每條鼻胃管最長使用4週就須丟棄換新。
- *請勿插入過短或過長的鼻胃管，以免造成患者不適或影響灌食效果。
- *插入的鼻胃管長度為鼻尖到耳垂的距離+耳垂到胸骨劍突的距離。
- *本產品為滅菌產品，若使用前包裝有破損，請勿使用。
- *本產品為一次性產品，不可重複使用。

七、儲存：

請存放於乾燥陰涼處。

八、滅菌資訊：

- *本產品以環氧乙烷 (EO)滅菌。
- *本產品有效期間：三年（詳見包裝上的保存期限）。
- *本產品為一次性使用產品，使用後不可再次滅菌重覆使用。

九、產品規格：

一截式：

型號	管徑尺寸	外徑	總長度
ANGT-1-04-40	4FR	1.35mm	40cm
ANGT-1-05-40	5FR	1.67mm	40cm
ANGT-1-06-40	6FR	2.0mm	40cm
ANGT-1-08-80	8FR	2.7mm	80cm
ANGT-1-10-80	10FR	3.3mm	80cm
ANGT-1-12-120	12FR	4.0mm	120cm
ANGT-1-14-120	14FR	4.7mm	120cm
ANGT-1-16-120	16FR	5.3mm	120cm
ANGT-1-18-120	18FR	6.0mm	120cm
ANGT-1-20-120	20FR	6.7mm	120cm

“阿爾傑”胃管(滅菌)
“ALGER” STOMACH (GASTRIC) TUBE (Sterile)

兩截式：

型號	管徑尺寸	外管長度	內管長度	總長度
ANGT-2-08-30	8FR	60cm	30cm	90cm
ANGT-2-08-35			35cm	95cm
ANGT-2-08-40			40cm	100cm
ANGT-2-08-45			45cm	105cm
ANGT-2-08-50			50cm	110cm
ANGT-2-10-30	10FR	60cm	30cm	90cm
ANGT-2-10-35			35cm	95cm
ANGT-2-10-40			40cm	100cm
ANGT-2-10-45			45cm	105cm
ANGT-2-10-50			50cm	110cm
ANGT-2-12-50	12FR	60cm	50cm	110cm
ANGT-2-12-55			55cm	115cm
ANGT-2-12-60			60cm	120cm
ANGT-2-12-65			65cm	125cm
ANGT-2-12-70			70cm	130cm
ANGT-2-14-55	14FR	60cm	55cm	115cm
ANGT-2-14-60			60cm	120cm
ANGT-2-14-65			65cm	125cm
ANGT-2-14-70			70cm	130cm
ANGT-2-14-75			75cm	135cm
ANGT-2-16-55	16FR	60cm	55cm	115cm
ANGT-2-16-60			60cm	120cm
ANGT-2-16-65			65cm	125cm
ANGT-2-16-70			70cm	130cm
ANGT-2-16-75			75cm	135cm

“阿爾傑”胃管(滅菌)
“ALGER” STOMACH (GASTRIC) TUBE (Sterile)

型號	管徑尺寸	外管長度	內管長度	總長度
ANGT-2-18-55	18FR	60cm	55cm	115cm
ANGT-2-18-60			60cm	120cm
ANGT-2-18-65			65cm	125cm
ANGT-2-18-70			70cm	130cm
ANGT-2-18-75			75cm	135cm
ANGT-2-20-55	20FR	60cm	55cm	115cm
ANGT-2-20-60			60cm	120cm
ANGT-2-20-65			65cm	125cm
ANGT-2-20-70			70cm	130cm
ANGT-2-20-75			75cm	135cm

醫療器材商名稱:瀛海矽康科技股份有限公司





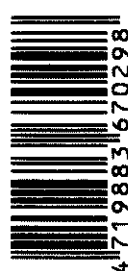
醫療器材商地址:「依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載」
(市售品須刊載實際地址)

製造業者名稱:瀛海矽康科技股份有限公司

製造業者地址:南投縣南投市彰南路一段555號

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“阿爾傑”胃管(滅菌)	申請醫療器材商	藏海矽康科技股份有限公司
--------	-------------	---------	--------------

“阿爾傑”胃管(滅菌)	
<p>產品編號：ANGT-1-16-120(一截式)</p> <p>管徑尺寸：16FR</p> <p>長度：120CM</p> <p>滅菌方式：STERILEIO 環氧乙烷</p> <p>製造日期：2022-06-17 </p> <p>保存期限：2025-06-17 </p> <p>批號：20220616226 LOT</p>	<p>注意事項 </p> <p>* 使用前必須詳細閱讀說明書，並遵照指示使用。</p> <p>* 須經醫囑指示或指導下使用。</p> <p>* 本產品須由護理人員或受過專業訓練的人員操作使用。鼻腔外置置處，需牢靠固定。</p> <p>* 本產品為滅菌產品，使用前如包裝有破損，請勿使用。</p> <p>* 不可使用尖銳物操作本產品，以免本產品破損。</p> <p>* 須存放於乾燥陰涼處。</p> <p>* 本產品為一次性使用，不可重複使用。 </p>
	
<p>許可證字號：衛部醫器製字第007744號</p> <p>醫療器材商名稱：藏海矽康科技股份有限公司</p> <p>醫療器材商地址：「依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載」(市售品須刊載實際地址)</p> <p>醫療器材商電話：(049)222-5037</p> <p>製造業者名稱：藏海矽康科技股份有限公司</p> <p>製造業者地址：南投縣南投市彰南路一段555號</p>	
 <p>4 719883 670298</p>	

或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。

※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

中文名稱	“阿爾傑”胃管(滅菌)	申請醫療器材商 藏海矽康科技股份有限公司
------	-------------	----------------------

"阿爾傑"胃管(滅菌)

產品編號: ANGT-2-16-55(兩截式)

管徑尺寸: 16FR

長度: 內55CM 外60CM(總長115CM)

滅菌方式: **STERILE**EO 環氧乙烷

製造日期: 2022-06-17 

保存期限: 2025-06-17 

批號: 20220616226 **LOT**



注意事項

- * 使用前必須詳閱使用說明書，並遵照指示使用。
- * 須經醫師指示或指導下使用。
- * 本產品須由護理人員或是受過專業訓練的人員操作使用。鼻腔外留置處，需牢靠固定。
- * 本產品為滅菌產品，使用前如包裝有破損，請勿使用。
- * 不可使用尖銳物體操作本產品，以免本產品破損。
- * 須存放於乾燥陰涼處。
- * 本產品為一次性使用，不可重複使用。

許可證字號: 衛部醫器製字第007744號
 醫療器材商名稱: 藏海矽康科技股份有限公司
 醫療器材商地址: 「依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載」(市售品須刊載實際地址)
 醫療器材商電話: (049)222-5037
 製造業者名稱: 藏海矽康科技股份有限公司
 製造業者地址: 南投縣南投市彰南路一段555號



4719883670526

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	"阿爾傑"胃管(滅菌)	申請醫療器材商	瀛海矽康科技股份有限公司
產品照片			
一截式鼻胃管			
 			

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	"阿爾傑"胃管(滅菌)	申請醫療器材商	瀛海矽康科技股份有限公司
產品照片			
兩截式鼻胃管			
 <p>The image shows the product packaging and the device itself. The top part is a white paper bag with a label. The label contains the following information:</p> <p>"阿爾傑"胃管(滅菌)</p> <p>產品編號: ANGT-2-16-55(兩截式) 注意事項 </p> <p>管徑尺寸: 16FR * 使用前必須詳閱使用說明書, 並遵照指示使用。</p> <p>長度: 內55CM 外60CM(總長115CM) * 須經醫師指示或指導下使用。</p> <p>滅菌方式: STERILE EO 環氧乙烷 * 本產品須由護理人員或是受過專業訓練的人員操作使用, 鼻腔外置置處, 需牢靠固定。</p> <p>製造日期: 2022-06-17  * 本產品為滅菌產品, 使用前如包裝有破損, 請勿使用。</p> <p>保存期限: 2025-06-17  * 不可使用尖銳物戳破本產品, 以免本產品破損。</p> <p>批號: 20220616226  * 須存放於乾燥陰涼處。</p> <p> 許可證字號: 衛部醫器製字第007744號 * 本產品為一次性使用, 不可重複使用。 </p> <p>醫療器材商名稱: 瀛海矽康科技股份有限公司 製造日期: 2022-06-17</p> <p>醫療器材商地址: "台北市衛生局新發之醫療器材商地址內容刊載"(市售品須刊載實際地址) 製造日期: 2022-06-17</p> <p>醫療器材商電話: (049)222-5037 製造日期: 2022-06-17</p> <p>製造業者名稱: 瀛海矽康科技股份有限公司 製造日期: 2022-06-17</p> <p>製造業者地址: 南投縣南投市彰南路一段555號 製造日期: 2022-06-17</p> <p>Barcode: 4719883670526</p> <p>The bottom part of the image shows the two-section nasal gastric tube, which is a clear, flexible tube with a blue connector at one end. The tube is coiled and has markings for length: 40, 45, 50, 55, and 60.</p>			

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，